



## Istruzioni Operative per eseguire tamponi di superficie per ricerca COVID-19

1. *Identifica l'area da campionare,*
2. *Indossa i dispositivi di sicurezza idonei (guanti, mascherine, occhiali di protezione ecc),*
3. *Svita il tampone (foto 1) dal suo contenitore*
4. *Campiona una superficie 10x10 cm (pari a 100cm<sup>2</sup>) con il puntale del tampone (foto 2),*
5. *Inserisci il dispositivo all'interno della soluzione DOUBANG (foto 3) rompendo l' asta (foto 4). Maneggia con cautela evitando schizzi,*
6. *Getta la soluzione di trasporto avvitandola con il suo tappo,*
7. *Identifica il tampone, con un codice o un nome*
8. *Conserva il tampone tra 2°C e 8°C in attesa di spedirlo*
9. *Spedisci il tampone al laboratorio a temperatura refrigerata (puoi usare un siberino ed una busta termica),*
10. *Attendi i risultati che Ti arriveranno direttamente via email dal Laboratorio,*
11. *Sei soddisfatto del servizio? Condividi l'esito taggando i nostri contatti social e riceverai uno sconto del 10% sulla prossima fornitura*



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**ATTENZIONE:** spedisce il tampone il giorno stesso in cui lo hai eseguito onde evitare di falsare il risultato. Evita le spedizioni giorni prefestivi.